

Kurzbedienungsanleitung dentaZOOM LVB-03r und LVB-03b

1.

Packungsinhalt

- Brille mit Schlauchhalterung
- Luftbügel
- Absperrventil
- Selbstsperrende Kupplung
- Druckminderer (nur LVB-03b)
- Y-Verteiler
- 4,5m Schlauch
- Adapter verschiedener Größen (4, 6, 8, 10mm auf 4mm)
- Befestigungsmaterial für den Druckminderer

2.

Die Luftvorhang-Brille

Die Luftvorhang-Brille ist bereits fertig montiert und kann sofort nach der Verbindung mit der Einheit eingesetzt werden.



3.

Verbinden mit der Einheit

Zum verbinden der Brille mit der Einheit, schalten Sie zunächst den für die Einheit zuständigen Kompressor aus und lassen den Druck ab.

Ermitteln Sie Ihrer Behandlungseinheit einen Druckschlauch mit Durchmesser 4,6,8 oder 10mm.

Durchtrennen Sie den Schlauch an einer geeigneten Stelle und fügen Sie den passenden Adapter ein indem Sie die Schlauchenden mit sanftem Druck einführen. Nach einem kurzen Widerstand rastet der Schlauch fest ein.

In das offene Ende des Verbinders wird nun der 4mm Adapter eingeschraubt.

Verbinden Sie danach den 4mm Schlauch der Luftvorhang-Brille mit dem T-Stück.



Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest sitzen, schließen Sie das Absperrventil (5) und schalten den Kompressor wieder ein.

Sobald der Kompressor wieder vollen Druck hat, können Sie das Absperrventil (5) öffnen. Die Brille ist nun einsatzbereit.

4.

Selbstabsperrende Kupplung

Um die Kupplung zu trennen, den Ring an der Buchse nach hinten ziehen und den Stecker herausziehen.




Zum Verbinden die Stecker und Buchse ineinander stecken bis sie einrasten.

5.

Absperrventil

Um die Brille in Behandlungspausen oder bei Nichtgebrauch auszuschalten drehen Sie das Absperrventil in die vertikale Position (Auslieferungszustand).


Zum Einschalten das Ventil wieder in die horizontale Position bringen. Die Brille ist dann sofort einsatzbereit.

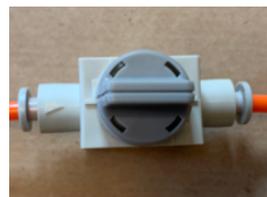

6.

Druckminderer (LVB-03b)

Hiermit kann der Druck in der Luftvorhang-Brille den Bedürfnissen angepasst werden. Hierzu im Betrieb das Einstellrad drehen bis der Zeiger den gewünschten Druck anzeigt. Durch herein drücken des Einstellrades wird dieses arretiert, es ist kein roter Ring zu sehen. Idealerweise sollte der Druck zwischen 0,2 und 0,4 MPa (2 bis 4 Bar) liegen. Der Druckminderer kann durch die beigelegte Halterung an einer festen Oberfläche montiert werden.

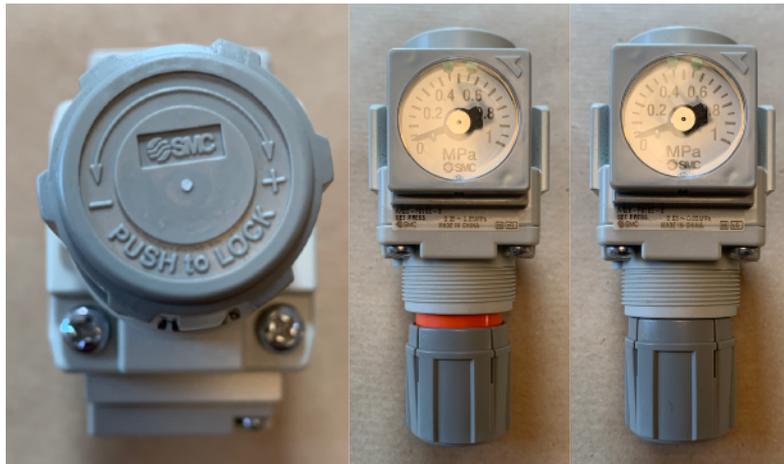

7.

Der Luftvorhang ist kein Medizinprodukt, sondern ein Speziallüfter. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder Telefon unter:

dentaZOOM UG

luftvorhang@dentazoom.de

030 367 86 23